



Anwendungshinweise

uroclean®men rt

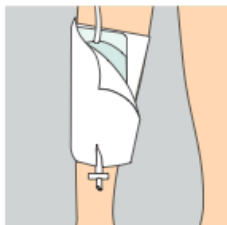


1. Bett- oder Beinbeutel* mit dem dafür vorgesehenen Halter am Unterschenkel, Oberschenkel oder Bett befestigen. Beutel auf Funktion nach Herstellerangaben prüfen.

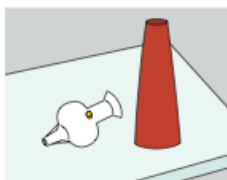

2. Die **uroclean®men** Montagehilfe auf eine feste Unterlage stellen. Den gelben Verschlussstopfen am Shuttle eindrücken.

Hinweis: Der gelbe Verschlussstopfen am **uroclean®men rt** Shuttle ist zur Entlüftung und ggf. zum Einspritzen von Spül- und Medikamentenlösungen. **Der Stopfen muss am Ende der Anwendung fest nachgedrückt werden!**

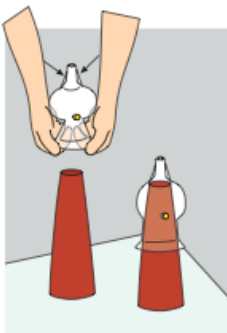

3. Mit Zeige-, Mittel- und evtl. Ringfinger beider Hände den Schaft des **uroclean®men rt** Shuttles dehnen. Gespreiztes **uroclean®men rt** Shuttle mittig über die Montagehilfe stülpen. (**Achtung:** nicht überdehnen)



4. Mit Daumen und Zeigefinger das **uroclean®men rt** Shuttle von der Montagehilfe in Richtung Spitze abrollen und aufgerolltes **uroclean®men rt** Shuttle von der Montagehilfe abnehmen.




5. Aufgerolltes **uroclean®men rt** Shuttle über den Penis stülpen und zur Peniswurzel hin abrollen. Bitte darauf achten, dass die Vorhaut nach vorne gestreift wurde.

Der gelbe Verschlussstopfen muss nach dem Anlegen direkt hinter der Eichel sitzen und immer nach oben zeigen.




6. Mit dem leicht abstehenden, durchgehenden Schafrand des Shuttles in Längsrichtung den **uroclean®men** Shuttle-Schaft vorsichtig glätten, so dass keine Falten mehr vorhanden sind.

Gelben Verschlussstopfen nochmals nachdrücken. Das **uroclean®men rt** Shuttle ist nun am Penis angelegt.

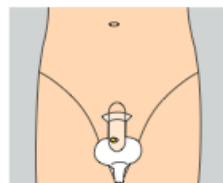

7. Den Adapter des Bett- oder Beinbeutel Schlauches mit dem Ablauf des **uroclean®men rt** Shuttles verbinden.

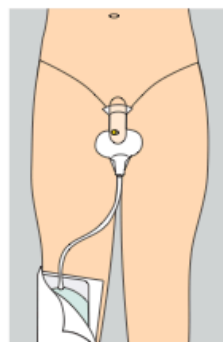

8. Den gelben Verschlussstopfen entfernen, dann zum Abnehmen das **uroclean®men rt** Shuttle von der Peniswurzel mit Daumen und Zeigefinger zur Penisspitze hin aufrollen. Anschließend kann das **uroclean®men rt** Shuttle ausgerollt und zur Wiederverwendung gereinigt und getrocknet werden.

*) ein Muster-Einwegbeinbeutel ist im Lieferumfang enthalten