

CONSEILS UTILES: La plupart des hommes subiront des fuites d'urine importantes en position horizontale. Afin d'alléger la pression de la pince, il serait peut-être préférable de porter une couche pendant les heures de sommeil. Si vous portez la pince en dormant, desserrez la pince à une taille moindre que vous celle que vous portez habituellement pendant la journée.

Le fait de porter des slips jockey plutôt que des boxers vous permettra d'éviter de perdre la pince si pour quelque raison que ce soit la pince glissait par mégarde. Les slips jockey permettront également de maintenir une couche bien en place.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS: Questions? Nous avons la réponse. SVP appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous serons ravis de vous aider.

MODALITÉS ET CONDITIONS:

Le Dribblestop™ est un appareil conçu pour les homes qui ont perdu le contrôle de leur vessie. La pince se fixe sur le pénis et applique de faibles pressions sur l'urètre afin d'arrêter les fuites d'urine. Des blessures pourraient survenir si ce produit n'est pas porté de manière adéquate avec les instructions fournies.

Portez la pince pénienne à vos propres risques. Si vous avez un problème médical autre que l'incontinence, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser l'appareil. Si vous éprouvez des problèmes, arrêtez immédiatement de porter la pince et consultez votre docteur ainsi que Rennich Industries Ltée.

GARANTIE: Le fabricant offre une garantie d'un an contre tous défauts et défaillance à partir de la date d'achat. Il n'y a pas de garantie contre la mousse à mémoire. Les réclamations liées à la garantie doivent être pré-approuvées. La preuve de l'achat sera requise.

Pour plus d'informations ou pour placer une commande, nous vous invitons à voir nos sites web sur:

www.dribblestop.com

Fabriqué/Distributé par:

Rennich Industries Ltd.

#153 - 8737 212 St.

Langley, BC V1M 2C8 Canada

Courriel: dribblestop@shaw.ca

Tel: 604-882-2548

Sans frais: 1-866-748-2548

(Canada et US seulement)

Dribblestop™ est une marque de commerce déposée au Canada et É.-U.

Fait à 100% au Canada

Brevets au Canada et É.-U.

Dribblestop™ est enregistré avec Santé Canada - Canada

US Food and Drug Administration – É.-U.

Produits médecine et soins de la santé

Organisme de réglementation – Europe



Dribblestop™

Kit de fixation pour l'incontinence urinaire masculine

INSTRUCTIONS POUR UTILISATION

(Pour obtenir de meilleurs résultats, veuillez lire toutes les instructions.)

Chaque kit contient deux pinces et plusieurs barrettes de liaison. Il est important d'alterner les pinces un jour sur deux afin de permettre à la mousse à mémoire de retrouver sa forme et son ampleur et assurer une performance optimale.

La pince comporte deux montants en plastique et des barrettes de liaison permettant un bon ajustement à la taille voulue. Les montants supérieur et inférieur doublés de mousse à mémoire à cellules fermées approuvées médicalement, n'absorbent pas de liquide et sont faciles à nettoyer. Il suffit de laver la pince au savon et à l'eau tiède, puis rincer et sécher avec une serviette.

Le **montant supérieur possède une longue encoche fermoir marquée en rouge** pour identifier le dispositif de fermeture et de libération. Ce dispositif est conçu pour faciliter l'ouverture et la fermeture de la pince sans se fixer ensemble. **Le dispositif opposé est celui qui se fixe ensemble.**

Le **montant inférieur** est doublé de mousse rembourrée qui comprime la partie antérieure du pénis et ferme l'urètre pour éviter le besoin d'uriner. Du fait que la pince ne comprime pas les parties latérales du pénis, la circulation du sang n'est pas restreinte.

Si vous n'avez pas l'envie naturelle d'uriner, il est recommandé de relâcher la pince toutes les deux à trois heures afin d'éviter le remplissage excessif de la vessie. Pour vous protéger d'une perte d'urine accidentelle qui pourrait se produire si la pince n'est pas posée correctement, ou si vous faites des activités qui nécessitent de soulever des poids ou de subir des tensions, il est également recommandé de porter une couche.

SELECTION DE TAILLE DE LA PINCE

Les deux pinces sont pré-taillées pour un port de taille moyenne. Veuillez vous reporter aux instructions et diagrammes, à droite, pour ajuster sur une taille plus petite ou plus grande. **Pour une insertion facile de la barrette dans l'encoche sur le montant fixe, tenir la barrette en position verticale puis la pousser droit dans l'encoche, ou faire glisser la barrette à partir du côté.** Bien suivre les instructions suivantes pour un bon positionnement et entretien de vos pinces. N'oubliez pas que le but est d'obtenir un positionnement confortable avec seulement une pression légère sur le pénis.

Circoncis: Porter la pince directement sur la face antérieure du gland du pénis.


Non circoncis: Ou dans le cas où il y a de la peau lâche en plus sur la verge. La tendance naturelle de cette peau lâche est de se déplacer en avant sur le pénis. Il faudra donc retirer la peau en arrière du gland avant de positionner la pince. Ceci permettra d'éviter à la peau de descendre sur la verge et d'encombrer la pince. Cette méthode fonctionnera bien pour une personne en surpoids car elle empêchera la pince de se déplacer du fait de la pression exercée à partir de la base du pénis.

POSITIONNEMENT DE LA PINCE

1. Placez la pince ouverte 1-1.5 cm (1/2 inch) juste en arrière du gland du pénis; positionnez le pénis au milieu **du bas de la pince.**

2. Tout en maintenant la pince en place, placez le **haut de la pince** par dessus le pénis. Ce montant (de fermeture et d'ouverture) comportant l'encoche doit maintenant se trouver au-dessus et placée au centre du pénis. Accrochez la barrette dans le système de fermeture; la pince est alors en position fermée.

Assurez-vous que la verge se trouve bien au centre de la pince.

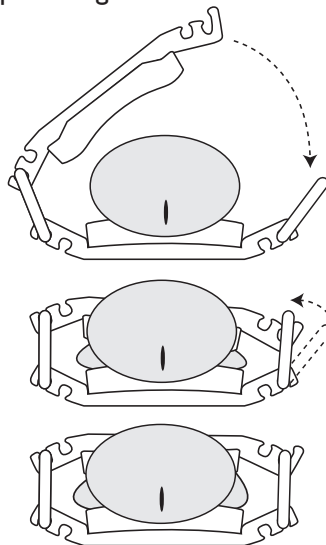

3. Pour éviter que le pénis glisse sur le côté (ce qui pourrait causer des fuites), évitez d'utiliser des barrettes de plus d'une taille de différence sur les montants respectifs de la pince. Par exemple : Utilisez une petite barrette sur un montant et une petite barrette sur l'autre montant, ou une petite avec une moyenne, mais évitez d'utiliser une petite avec une large.

4. Avec les barrettes supplémentaires fournies, les deux pinces peuvent être ajustées exactement à la taille identique.

5. Remplacez les pinces tous les jours.


6. Bien nettoyer la région génitale afin d'éviter toute irritation.

Si vous êtes conscient que vous portez la pince, soit en ressentant une pression gênante ou une légère douleur, ceci est une indication que la pince est trop serrée. Assurez-vous qu'un pli ne soit pas présent sur la peau du pénis car cela pourrait également provoquer une gêne. Le port approprié de la pince doit être confortable tout en bloquant toute fuite d'urine. Si vous avez besoin d'uriner, détachez simplement l'encoche tout en laissant la pince en place; une fois que vous aurez fini, refermez la pince.

Les diagrammes de la pince montrent les options de tailles disponibles en utilisant seulement les encoches extérieures. Des tailles plus petites peuvent être obtenues en utilisant les encoches intérieures. Pour obtenir des 1/2 tailles plus grandes ou plus petites, il suffit de combiner et de faire concorder les tailles seulement d'une taille de barrette de différence entre les montants. Les deux pinces dans le kit sont pré-taillées pour un ajustement de taille moyenne.


PETIT

Utiliser une petite barrette sur le montant fixe puis fermer avec une petite barrette sur le montant opposé.

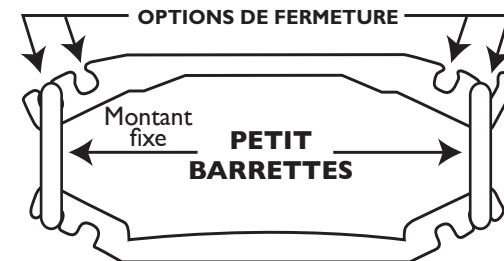

MOYEN

Utiliser une barrette moyenne sur le montant fixe puis fermer avec une barrette moyenne sur le montant opposé.

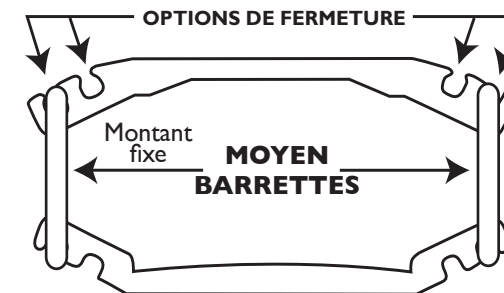

LARGE

Utiliser une barrette large sur le montant fixe puis fermer avec une barrette large sur le montant opposé.

